



## Fiche Technique

**Référence : PAD 1003 PP**



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle


## Pad Pack Électrodes Pédiatriques

### Descriptif :


Le Pad pack Pédiatrique est indiqué dans le traitement de patients souffrant d'arrêt cardio-pulmonaire, avec perte de connaissance, dont le pouls est indétectable et qui ne respirent pas spontanément.

Il permet au SAMARITAN PAD d'administrer à *des nourrissons et des enfants jusqu'à 8 ans, ou d'un poids de 25 kg*, un traitement à faible consommation d'énergie. Formellement déconseillé aux patients de moins d'un an.

Seules les électrodes SAMARITAN PAD portant l'étiquette  peuvent être utilisées avec le PACK PAD PEDIATRIC. Si le SAMARITAN PAD que vous utilisez ne porte pas cette étiquette, utilisez le kit électrodes pour adulte, si vous ne disposez d'aucune autre possibilité.

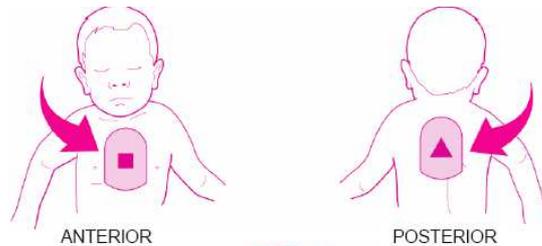

b)

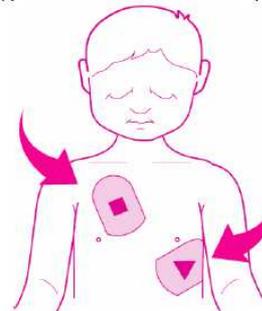

On peut mettre en place les électrodes si la taille de la poitrine de l'enfant est suffisamment large.

OU BIEN

si le traumatisme interdit une mise en place comme celle de la figure a).

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

