



CE



## Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel et de surface. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. Cette version équipée d'une pompe dish délivrant une dose par pression facilite l'usage de compresses. Le format du flacon, compatible avec les sacs et valises médicales, a spécialement été étudié pour les infirmières et médecins itinérants. Son bouchon assorti d'un verrouillage quart de tour permet de prévenir tout risque de fuite pendant le transport.

- Pompe dish distributrice d'une dose d'alcool
- Dispositif médical avec marquage CE
- Format nomade



230600

230554

4154

4054

4254

24051

24055

24054

24059

24056

24057

**COMPOSITION :** Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer sur la zone à préparer à l'aide d'une compresse. Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Éviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses. Flacon mini dish distributeur d'alcool isopropylique à 70%. Cette présentation, permet une souplesse et une sûreté d'utilisation, tout en évitant le phénomène d'évaporation. Usage externe.

**PRÉCAUTIONS :** Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/ liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.

## ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% VOL.

(GB)

ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)

ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

### CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Flacon 250 ml (24051)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	5,900 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	26 * 22 * 19,5
Nb total de produit par palette	864 unités
Poids total palette (hors palette)	430 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 90

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1 L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	•	•