



## Présentation

L'alcool isopropylique est un assainissant corporel. Il s'applique sur peau saine. Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications. La recharge 500ml est compatible avec la pompe fournie sur la référence 24054, ce qui permet un usage économique en conservant la pompe haut de gamme.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel (peau saine).
- Dispositif médical avec marquage CE
- Action immédiate



230600    230554    4154    4054    4254    24051    24055    24054    24059    24056    24057

**COMPOSITION :** Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer sur la zone à préparer à l'aide d'une compresse. Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Éviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses. Flacon recharge de 500 ml d'alcool isopropylique à 70%. Cette présentation, plus économique permet une souplesse et une sûreté d'utilisation, tout en évitant le phénomène d'évaporation. Ce flacon est à utiliser avec la pompe dish (brevetée) pour imprégner la bonne dose sur le coton. Usage externe.

**PRÉCAUTIONS :** Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné.

**ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% VOL.**

(GB)  
 ISOPROPYL ALCOHOL 70% VOL.

(NL)  
 ALCOHOL ISOPROPYL 70% VOL.

(E)  
 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% VOL.

### CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Flacon 500 ml (24055)
Colisage	Carton de 12 pièces
Poids du colisage	5,900 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	26 * 22 * 19,5
Nb total de produit par palette	864 unités
Poids total palette (hors palette)	430 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 90

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	2 ml	60 mm	80 mm
23055	Etui 100 pads	•	95 mm	52 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	36 mm	105 mm
4054	Aérosol	110 ml	35 mm	155 mm
4254	Pulvérisateur	100 ml	40 mm	150 mm
24051	Flacon pompe dish	250 ml	55 mm	165 mm
24055	Recharge	500 ml	60 mm	205 mm
24054	Flacon	500 ml	60 mm	205 mm
24059	Flacon	1L	85 mm	265 mm
24056	Bidon	2 L	135 mm	210 mm
24057	Bidon	5 L	•	•